



## Kurzanleitung für die hLine Pakete



*Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.*

# Inhalt

 <b>Wichtige Informationen Bitte zuerst lesen!</b>	3
<b>Einleitung</b>	4
<b>Die Geräte</b>	4
<b>Einsetzen der SIM-Karte und Akkus in das  <i>Fon</i> collect</b>	5
<b>Beginn des Registrierungsprozesses</b>	5
<b>1. Registrierungsprozess mit dem  <i>Fon</i> collect</b>	7
<b>2. Registrierungsprozess mit dem ANT USB Adapter</b>	8
<b>Installation der  <i>Line</i> ANT USB Adapter Software</b>	8
<b>Eintragen des  <i>Line</i> ANT USB Adapters in das hLine Online Portal und Erhalt der IMEI Nummer</b>	10
<b>Ihr Profileinstellungen bearbeiten</b>	11
<b>Geräte einschalten und loslegen!</b>	11



# **Wichtige Informationen Bitte zuerst lesen!**

## **Sicherheitshinweise / Allgemeine Verwendung**

- Achten Sie darauf, Gerät und Zubehör von Kleinkindern fern zu halten, da Kleinteile verschluckt werden könnten. *Verschlucken kann zu Ersticken oder schlimmen Verletzungen führen!*
- Achten Sie darauf, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten. *Nichtbeachtung kann zu schwerwiegenden Störungen des Herzschrittmachers (oder anderer medizinischer Geräte) führen!* Schalten Sie Ihr Gerät im Zweifelsfall besser ab, um dies zu verhindern!
- Die Verwendung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern verboten, da elektromagnetische Störungen medizinische Geräte beeinflussen und/ oder stören können. *Halten Sie sich an die vor Ort geltenden Bestimmungen und schalten Sie Ihr Gerät ggf. ab!*
- Falls Sie selbst ein anderes, medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich bei dessen Hersteller, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Kontaktieren Sie ggf. Ihren Arzt wenn Sie Zweifel an der Vereinbarkeit der Geräte miteinander haben. *Verwenden Sie dieses Gerät nur, wenn Sie alle Störungen anderer medizinischer Geräte ausschließen können.*
- Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit diesem Gerät um.
- Nehmen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander. Stecken Sie niemals Gegenstände in Gehäuseschlitze oder andere Öffnungen des Gerätes.
- Achten Sie stets darauf, dass das Gerät nicht nass wird und keine Feuchtigkeit in die Gehäuseöffnungen eintritt. *Feuchtigkeit kann zu schweren Schäden am Gerät führen!* Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an!
- Vermeiden Sie Stöße oder das Herunterfallen des Gerätes. Behandeln Sie dieses Elektronikprodukt stets mit der nötigen Vorsicht, um Schaden am Gerät zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Gerät nicht, da die Lacke die beweglichen Teile verkleben und das Gehäuse bzw. das gesamte Gerät beschädigen könnte.

# Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für **Line-Online.com** entschieden haben. Mit **Line-Online.com** können Sie nun Ihre Vitalwerte verwalten und erhalten somit einen idealen Überblick über Ihre Werte.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie sich auf **Line-Online.com** registrieren können und in wenigen Minuten sofort loslegen können.

## Die Geräte

### Line Fon collect

Abb. 1



Schlüsselring (zur Befestigung am Schlüsselbund)

### Line ANT USB Adapter

Abb. 2



Der ANT USB Adapter kann mittels USB direkt an den PC angeschlossen werden.

## Einsetzen der SIM-Karte und Akkus in das **h<sup>Fon</sup> collect**

Entfernen Sie bitte die SIM-Karte aus der Halterung. Beim Einsetzen der SIM Karte beachten Sie bitte Folgendes: Ziehen Sie zunächst die Metallhalterung in Richtung USB-Anschluss und anschließend nach oben. Dann können Sie die SIM-Karte im **h<sup>Fon</sup> collect** mit den goldenen Kontakten nach unten einlegen und die Metallhalterung wieder verschließen. Die Kerbung muss dabei in Richtung Schlüsselanhänger zeigen (s. Abb.3).

Setzen Sie anschließend den Akku ein (s. Abb. 4) und schließen das Gehäuse mit dem Akkufachdeckel. Danach verbinden Sie das **h<sup>Fon</sup> collect** mit dem Ladeadapter (mit oder ohne Kabel). Lassen Sie das **h<sup>Fon</sup> collect** beim erstmaligen Laden ca. 4 Stunden an der Stromversorgung.

Abb. 3



Abb. 4



## Beginn des Registrierungsprozesses

Gehen Sie auf die Webseite **www.hline-online.com**, um sich zu registrieren. Zuerst müssen Sie auf „Anmelden“ und anschließend auf „Registrieren“ klicken. Nun können Sie zuerst Ihren gewünschten Benutzernamen und Ihre E-Mail Adresse angeben. Siehe Abb. 5

Anmelden

**h Line**  
Wellness by hhm.

Account information

Benutzername: \*

Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.

E-Mail Adresse: \*

A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.

Abb. 5

Weiter unten auf derselben Seite können Sie den Lizenz- Code, der auf der Rückseite dieser Kurzanleitung zu finden ist, in das vorgegebene Feld eintragen. Bitte setzen Sie zudem den entsprechende Haken in das weiße Kästchen. Danach klicken Sie auf „Konto erstellen“. Siehe Abb. 6

The image shows a registration form titled "Registration Type" with three main sections separated by "ODER" (OR) labels. Each section has a radio button and a text input field for a serial number. The third section, "License-Code", is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the form is a "Create new account" button.

**Registration Type**

Falls Sie ein smart:AB® Gerät mit Datenübertragung besitzen, tragen Sie hier bitte die Seriennummer des Gerätes ein, um sich auf dem iLine Online Portal zu registrieren. Bei der ersten Registrierung der Seriennummer sind die ersten 3 Monate kostenlos! Bitte tragen Sie die Seriennummer des Gerätes in das vorgesehene Feld ein.

Account with Device

Seriennummer:

**ODER**

Falls Sie kein Gerät besitzen, können Sie sich über das manuelle Konto einloggen. Der 1. Monat ist bei dieser Registrierung kostenlos!

Manual Account

**ODER**

Das Anlegen und Nutzen eines Mentor-Kontos ist kostenlos. Hierzu benötigen Sie die Seriennummer eines smart:AB® Gerätes mit Datenübertragung einer Person, die Sie zukünftig betreuen möchten. Bitte tragen Sie die Seriennummer des Gerätes in das vorgesehene Feld ein.

Mentor Account

Seriennummer:

**ODER**

Bei dem Kauf eines iLine Pakets erhalten Sie einen Lizenzcode, der auf der Rückseite der Kurzanleitung notiert ist. Bitte tragen Sie diesen in das vorgesehene Feld ein.

License-Code

License-Code:

Create new account

Abb. 6

Nachdem Sie Ihren Benutzernamen, Ihre E-Mail Adresse und Ihren Lizenzcode angegeben haben, erhalten Sie eine E-Mail auf die angegebene Adresse. Nun können Sie sich über zwei Wege in das **iLine-Online.com** Portal einloggen. Entweder Sie geben den Benutzernamen und das Passwort, dass Ihnen über die E-Mail zugesendet wurde, selbst ein oder Sie verwenden den Link, der in Ihrer E-Mail vorhanden ist. Dieser Link leitet Sie direkt an das Portal weiter.

Es bestehen zwei Möglichkeiten der Registrierung:

1. Registrierung mit dem **h<sup>Fon</sup> collect**
2. Registrierung mit dem **h<sup>Line</sup> ANT USB Adapter**

Fahren Sie entsprechend Ihrer Übertragungseinheit mit der Registrierung fort.

## 1. Registrierungsprozess mit dem **h<sup>Fon</sup> collect**

Um eine Datenübertragung zu ermöglichen, müssen zum einen das **h<sup>Fon</sup> collect** und Ihre Geräte in das **h<sup>Line</sup>-Online.com** Portal eingefügt werden. Hierzu gehen Sie direkt nach der Anmeldung zu „“ (Einstellungen) und klicken dann auf „“ (Geräteverwaltung).

Unter Geräteeinstellungen können Sie nun Ihr **h<sup>Fon</sup> collect** eintragen. Hierzu gehen Sie auf das Drop-Down Menü und klicken auf „**h<sup>Fon</sup> collect**“ (s. Abb. 7). Danach müssen Sie

die IMEI Nr. eintragen (s. Abb. 8) und klicken auf „“. Die IMEI Nr. finden Sie in Ihrem **h<sup>Fon</sup> collect** unter der Batterie.

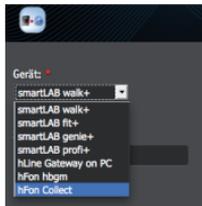


Abb. 7

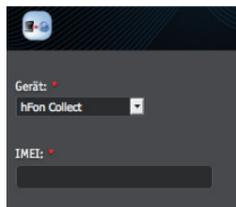


Abb. 8

Nachdem das **h<sup>Fon</sup> collect** eingetragen wurde, können Sie Ihre anderen Geräte auf dem gleichen Weg in das Portal eintragen.

## 2. Registrierungsprozess mit dem ANT USB Adapter

### Installation der hLine ANT USB Adapter Software

Bevor Sie nun den Adapter verwenden können, müssen Sie eine Software auf Ihrem PC installieren. Diese Software finden Sie unter [www.hmm.info/downloads](http://www.hmm.info/downloads) unter Software Download. Der Name der Software lautet: hLine Gateway. Laden Sie die Software herunter und öffnen Sie die Datei „Setup“ um diese zu installieren. Folgendes Fenster wird erscheinen (s. Abb. 11).



Abb. 11



Abb. 12



Abb. 13

Nun klicken Sie auf „Weiter“. Sie werden dazu aufgefordert, einen Speicherort auszuwählen (s. Abb. 12). Nachdem Sie einen geeigneten Speicherort gefunden haben, klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation erneut zu bestätigen. Die Software wird nun installiert. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Software installieren möchten, bestätigen Sie mit „Ja“ (s. Abb. 13).

Nachdem die Installation beendet wurde, müssen Sie einen Neustart durchführen (s. Abb. 14).



Abb. 14



Abb. 15

Nach dem Neustart finden Sie auf entweder in Ihrer Startleiste das Symbol  des ANT USB Adapter Programmes oder auf Ihrem Desktop.

Falls die Software auf Ihrem Desktop liegt (s. Abb. 15), können Sie diese mit einem Doppelklick starten und auf Ihrer Startleiste erscheint das Symbol des Programmes. Wenn das Symbol in Ihrer Startleiste zu finden ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol um zu den Einstellungen unter „Settings“ zu gelangen (s. Abb. 16). Nun wird ein Fenster geöffnet in dem Sie die IMEI Nummer des Adapters eintragen sollen (s. Abb. 17). Auf der nächsten Seite wird Ihnen beschrieben, wie Sie die Nummer des Adapters erhalten. Bitte achten Sie darauf, dass im Serverfeld „**hline-online.com**“ als Server angegeben ist. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

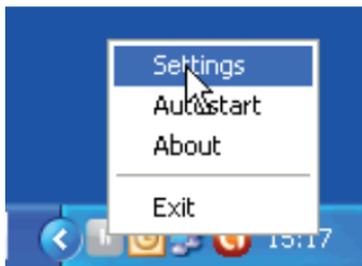


Abb. 16

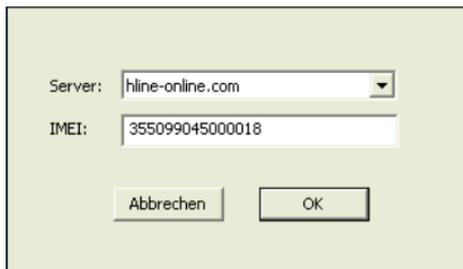


Abb. 17

## Eintragen des *Line* ANT USB Adapters in das hLine Online Portal und Erhalt der IMEI Nummer

Um Ihren  *Line* ANT USB Adapter verwenden zu können, müssen Sie nach der Installation der Software diesen in das Portal eintragen. Dafür gehen Sie folgendermaßen vor:

Nachdem Sie sich im Portal angemeldet haben, müssen Sie zu  (Einstellungen) und  (Geräteeinstellungen) gehen.

Nun können Sie anhand dem Drop-Down Menü den  *Line* ANT USB Adapter unter „hLine Gateway on PC“ auswählen (s. Abb 18) und klicken auf den Speicherbutton .



Abb. 18

Nachdem Sie den Speicherbutton getätigt haben, erhalten Sie eine Seriennummer (IMEI Nummer), die Sie für die Anmeldung des Gerätes bei der bereits installierten Software benötigen (Abb. 19).

Abb. 19

Seriennummer	Benutzer	Letzte Übertragung	Status senden	
hLine Gateway on PC				
PC9608260984532	0	-		

## Ihr Profileinstellungen bearbeiten

Nun können Sie neben den Geräteeinstellungen auch Ihr Profil bearbeiten.

Über „“ (Einstellungen) und „“ (Profileinstellungen) können Sie Ihr Profil bearbeiten und vervollständigen. Einige Angaben sind wichtig für die Erinnerungsfunktion, wie die Grenzwerte zu Blutdruck und Blutzucker.

## Geräte einschalten und loslegen!

Jetzt kann es losgehen!

Falls Sie ein **hFon** collect verwenden, klicken Sie den Knopf des Gerätes länger als 3 Sekunden (Versichern Sie sich, dass die Tastatursperre seitlich nach oben zeigt.) Diesen Schritt können Sie auch durchführen, wenn das hFon collect mit dem Ladeadapter verbunden ist.

Falls Sie den **hLine** ANT USB Adapter nutzen, müssen Sie diesen nur in Ihren PC einstecken und bevorzugt stecken lassen, um eine regelmäßige Übertragung zu gewährleisten.

Wenn sich das Symbol  in  ändert, wurde Ihr Adapter erkannt und die Übertragung kann nun durchgeführt werden.

Um eine Übertragung der Messgeräte zu ermöglichen, müssen Sie die Seriennummern der smartLAB® Geräte in das **hLine-Online.com** Portal eintragen. Hierzu gehen Sie unter 

(Einstellungen) auf  Geräteeinstellungen. Wählen Sie in dem Drop-Down Menü das entsprechende Gerät aus und geben die Seriennummer ein.

Wenn Sie nun Messungen mit Ihren smartLAB® Messsystemen durchführen, werden die Werte, sobald Sie in der Nähe eines der Übertragungsgeräte sind, auf das **hLine-Online.com** Portal übertragen.

Ihr hLine Online Lizenzcode:

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX



**HMM Diagnostics GmbH**  
Friedrichstr. 89  
69221 Dossenheim, Germany  
[www.hmm.info](http://www.hmm.info)